



<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>CANULA GUEDEL DESC. FOYOMED</b>																																
<b>PROCEDENCIA:</b>	CHINA	<b>MARCA:</b>	FOYOMED																														
<b>LINEA DE ESPECIALIZACIÓN:</b>	USO GENERAL																																
<b>REGISTRO SANITARIO:</b>	11865-DME-0621																																
<b>NIVEL DE RIESGO:</b>	I																																
<b>ESTERILIZACIÓN:</b>	ÓXIDO DE ETILENO																																
<b>PRESENTACIÓN:</b>	UNIDAD																																
<b>MEDIDA:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>MEDIDA</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>40 MM</td> <td>ROSA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>50 MM</td> <td>AZUL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>60 MM</td> <td>NEGRA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>70 MM</td> <td>BLANCA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>80 MM</td> <td>VERDE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>90 MM</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>100 MM</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>110 MM</td> <td>CELESTE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>120 MM</td> <td>NARANJA</td> </tr> </tbody> </table>	NÚMERO	MEDIDA	COLOR	00	40 MM	ROSA	0	50 MM	AZUL	1	60 MM	NEGRA	2	70 MM	BLANCA	3	80 MM	VERDE	4	90 MM	AMARILLO	5	100 MM	ROJO	6	110 MM	CELESTE	7	120 MM	NARANJA		
NÚMERO	MEDIDA	COLOR																															
00	40 MM	ROSA																															
0	50 MM	AZUL																															
1	60 MM	NEGRA																															
2	70 MM	BLANCA																															
3	80 MM	VERDE																															
4	90 MM	AMARILLO																															
5	100 MM	ROJO																															
6	110 MM	CELESTE																															
7	120 MM	NARANJA																															
<b>VIDA ÚTIL:</b>	5 AÑOS																																
<b>FACTOR DE EMPAQUE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRIMARIO</b> Empaque plástico que garantiza la integridad del contenido, el transporte y almacenamiento.</li> <li>• <b>SECUNDARIO</b> Material resistente a la estiba, sellado con cinta de embalaje, en buenas condiciones garantiza la integridad del contenido, el transporte y almacenamiento</li> </ul>																																
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido.</li> <li>• Borde externo para fijación en los dientes.</li> <li>• Orificio interno para succión.</li> <li>• Codificada en código de colores.</li> <li>• Marcada con numeración.</li> <li>• Libre de látex.</li> </ul>																																

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descartable</li> </ul>
<b>COMPONENTES:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polietileno</li> </ul>
<b>INDICACIONES/ MANUAL DE USO</b>		<p><b>INDICACIÓN</b> <b>CANULA GUEDEL DESC. FOYOMED</b> se emplean para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impide que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire</li> <li>• Anestesia general para mantener abiertas las vías orofaríngeas.</li> <li>• Exploración endoscópica.</li> <li>• Víctimas en estado de inconciencia.</li> </ul>
<b>ADVERTENCIAS PRECAUCIONES:</b>	<b>Y</b>	<p>Descartar si el empaque se encuentra dañado o roto. Desechar según normas de bioseguridad. Proteger del calor, luz solar y humedad. Almacenar en un lugar limpio y seco, libre de polvo y lejos de la luz ultravioleta o fluorescente.</p>
<b>CONDICIONES ALMACENAMIENTO:</b>	<b>DE</b>	<p>Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa. Almacenar en un lugar fresco y seco. Temperatura homogénea menor a 30°C. Humedad relativa 60%. El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras. Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo. No se deben usar ni aerosoles, ni espray para desinfectar o aromatizar. Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores. Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared. Se recomienda seguir la siguiente señalética, para mejor utilización y preservación del producto:</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Embalaje debe mantenerse en posición vertical</li> <li>2. Cantidad de cajas apiladas</li> <li>3. Frágil</li> <li>4. No exposición a humedad</li> <li>5. Bajo protección de sol</li> <li>6. Temperatura adecuada</li> </ol>
<b>CERTIFICACIÓN:</b>		NORMA ISO 13485

<b>CODIGO DE BARRAS:</b>	7862105742680 CANULA GUEDEL 00 (40 MM) DESC. FOYOMED (ROSADA) 7862105742697 CANULA GUEDEL 0 (50 MM) DESC. FOYOMED (AZUL) 7862105742994 CANULA GUEDEL 1 (60MM) DESC. FOYOMED (NEGRO) 7862105743007 CANULA GUEDEL 2 (70MM) DESC. FOYOMED (BLANCO) 7862105743014 CANULA GUEDEL 3 (80MM) DESC. FOYOMED (VERDE) 7862105743021 CANULA GUEDEL 4 (90MM) DESC. FOYOMED (AMARILLO) 7862105743038 CANULA GUEDEL 5 (100MM) DESC. FOYOMED (ROJO) 7862105742369 CANULA GUEDEL 6 (110MM) DESC. FOYOMED (CELESTE) 7862105742376 CANULA GUEDEL 7 (120MM) DESC. FOYOMED (NARANJA)
--------------------------	---

